

UNAWheel Maxi



Guide de démarrage rapide **Fr**
Quick start guide **En**
Guía de inicio rápido **Es**
Guia rápido **Pt**
Guida Rapida **It**
Snelstartgids **Nl**
Rychlý návod **Cz**



**Roue motorisée
haute-performance
pour fauteuil
roulant**



Moteur 450 W

Fiable et puissante



Vitesse max 20 km/h

5 modes de vitesse



Autonomie de 25 km

Une distance parfaite en
une seule charge



Batterie Li-ion de 288 Wh

Réponds aux exigences des
compagnies aériennes



**Adapté pour tous
les fauteuils roulants**

Compatible avec la plupart
des fauteuils roulants sur
le marché, basiques et actifs




Polyvalente

UNAWheel Maxi est idéale
pour des déplacements urbains
ou également ruraux

info@gt-concept.fr
+(33) 4 74 93 12 38
www.gt-concept.fr




<https://maxi.unawheel.eu/manual>

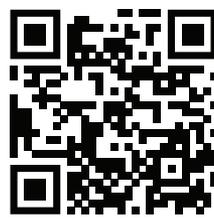

Fr	Manuel d'utilisation complet	Manuel interactif simplifié en ligne
En	Full text manual	Quick animated online manual
Es	Manual de texto completo	Manual en línea animado rápido
Pt	Manual de texto completo	Manual online de animação rápida
It	Manuale di testo completo	Manuale online animato veloce
Nl	Volledige tekst handleiding	Snelle geanimeerde online handleiding
Cz	Plně textový manuál	Rychlý animovaný online návod

Installer l'adaptateur

1. Monter les pinces

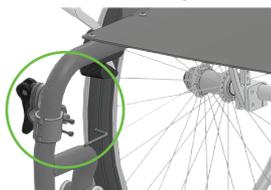


2. Assembler l'adaptateur



3. Monter l'adaptateur, régler la

hauteur, l'angle d'inclinaison et serrer toutes les vis

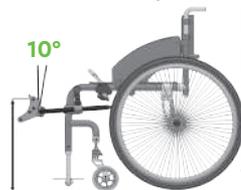

Connecter

1. Attacher le crochet supérieur à l'adaptateur




2. Pousser le guidon en avant jusqu'à ce qu'il se clipse



Déconnecter


1. Verrouiller les freins du fauteuil. Pousser légèrement le guidon vers l'avant et freiner

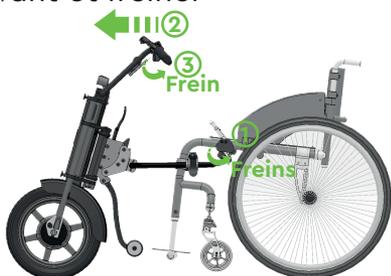

2. Tirer la poignée de l'adaptateur vers le fauteuil, déverrouiller le frein



3. Ouvrir les pinces et pousser le guidon vers l'avant

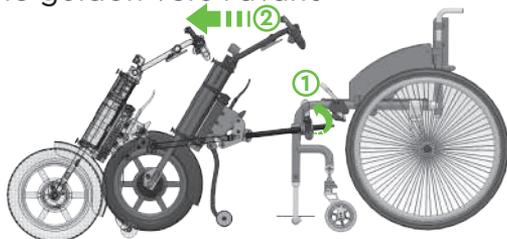

Connecter et déconnecter la roue doit être sans difficulté. Si connecter ou déconnecter demande un gros effort, c'est que l'installation n'est pas faite correctement ou qu'une pièce est cassée. Contrôler l'installation et contacter votre prestataire.

Contrôle



- 1 - Ecran
- 2 - Selection mode de vitesse +/-, Menu
- 3 - Levier de frein avec sonnette
- 4 - Marche arrière
- 5 - On/off
- 6 - Accélérateur